



Protector dental

para quirófano

One Size 
Un solo uso



Ref.: PRIMDENT



Protector dental

- Protector dental **diseñado para proteger la dentadura** del paciente durante procedimientos médicos en los que se puedan dañar los dientes.
- Fabricado con una **carcasa externa resistente** que actúa como barrera entre los dientes y el instrumental médico.
- Incluye una **pieza interior de material amortiguador** que absorbe el impacto, proporcionando una protección adicional.
- Incorpora un **cordón de seguridad** para facilitar la extracción del protector cuando sea necesario.



Indicaciones

- Cirugía endoscópica.
- Procedimientos en los cuales se precise el empleo de la pala laparoscópica.
- Protección dental.

Protector dental

para quirófano

Ref.: **PRIMDENT**

Protector dental

El protector dental desechable, **de un solo uso**, es el producto sanitario adecuado para la **protección de la dentadura del paciente durante la introducción de la pala del laringoscopio o en la cirugía endoscópica**, junto con el tubo endotraqueal, actos en los que se pueden dañar los dientes del paciente.

El uso de protectores dentales durante la intubación ha sido sugerido como una **medida preventiva para reducir el riesgo de lesiones dentales**.



Adaptable prácticamente a cualquier paciente.

Cada set se compone de:

- **Relleno de silicona extra-blanda altamente deformable** para que se adapte a cualquier configuración de dientes para amortiguar la presión en las encías. Atraumático. (1)
- **Coraza rígida externa** que presenta una cierta flexibilidad que se adapta a cualquier dentadura. (2)
- **Hilo de seguridad** para la extracción. (3)

Contraindicaciones

- Producto no estéril. No usar cuando se requieran condiciones de esterilidad.
- No usar en niños o en pacientes con el tamaño del arco dental muy pequeño.
- Uso no recomendado en pacientes con dentadura postiza.
- No usar para tratar afecciones dentales como bruxismo.
- No usar en pacientes con movilidad dental avanzada.

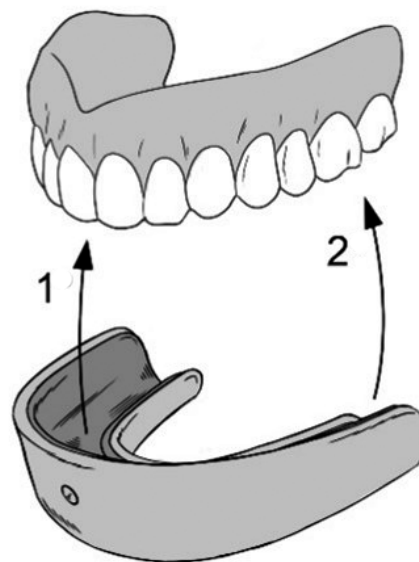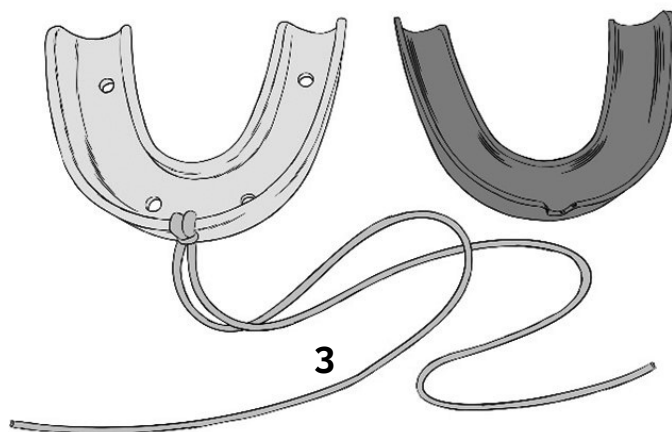

PRIMDENT

Codigo Pack

844394 1und

842648 40und

